

Comment utiliser I-DROP® MGD?



- 1** Assurez-vous d'avoir les mains propres avant de commencer
- 2** Ouvrez le sceau de sécurité
- 3** Placez le flacon à l'envers
- 4** Positionnez le point bleu central du flacon au-dessus de la région d'application désirée
- 5** Tirez délicatement la paupière inférieure vers le bas
- 6** Compressez doucement le flacon jusqu'à ce qu'une seule goutte se forme et tombe (pourrait prendre quelques secondes)
- 7** Recommencez avec l'autre œil
- 8** Secouez le flacon pour enlever tout résidu de liquide
- 9** Refermez bien le capuchon

Pourquoi reste-t-il un peu de liquide sur l'embout du flacon?

Après l'utilisation, une quantité résiduelle de liquide pourrait demeurer sur l'embout du flacon. Cela confirme que le flacon fonctionne comme désiré et ne réaspire pas le liquide dans la bouteille. Cette caractéristique est indispensable pour que le reste de la solution demeure stérile et sécuritaire. Lorsqu'exposée à un environnement extérieur non stérile, même une quantité minuscule de fluide peut devenir contaminée. Si un résidu de solution demeure sur le flacon après l'utilisation, secouez-le d'un geste sec pour l'enlever et fermez le capuchon correctement.

