

**FREI VON KONSERVIERUNGSTOFFEN  
UNVERZÜGLICHE UNDANHALTENDE HYDRATATION  
MIT KONTAKTLINSEN KOMPATIBEL  
0,18 % viskoadaptives Hyaluronan**

## VERBESSERTE LINDERUNG



### ANWENDUNGSGEBIETE

Für eine anhaltende Linderung von Beschwerden aufgrund von leichten Reizungen des Auges durch Wind, Sonne, Wasser oder andere Reizstoffe. Zur Anwendung als Gleitmittel und Schutz vor weiterer Reizung oder zur Linderung von Augentrockenheit. Kann zusammen mit Kontaktlinsen angewendet werden. I-DROP® PUR soll innerhalb von 12 Monaten nach dem Öffnen verbraucht werden. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums (📅) anwenden.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Gebrauch Hände waschen. Nicht nach dem Verfallsdatum anwenden. Je nach Bedarf einen Tropfen in das/die betroffene(n) Auge(n) geben. Während Sie in einen Spiegel schauen, vorsichtig das untere Augenlid nach unten ziehen und einen Tropfen auf die Lidinnenseite geben oder einen Tropfen direkt auf die Hornhautoberfläche des Auges auftragen, indem Sie sich in eine waagerechte Position zurücklehnen. Nach der Anwendung die verbleibenden Tropfen von der Spitze der Flasche schütteln und den Verschluss wieder aufsetzen. An einem kühlen, sauberen und trockenen Ort aufbewahren.

### ANWENDUNGSTIPPS

1. Die Flasche umkehren und leicht zusammendrücken, bis sich ein Tropfen auf der Spitze bildet. Dies kann einige Sekunden dauern, da die Lösung durch das Einwegventilsystem laufen muss.
2. Mit dem an der Spitze hängenden Tropfen die Flasche vorsichtig über das Auge führen und leicht drücken, bis er in das betroffene Auge fällt.
3. Bitte beachten: Nach der Anwendung kann eine Restmenge an Flüssigkeit an der blauen Spitze verbleiben. Hiermit wird bestätigt, dass die Flasche wie geplant funktioniert und diese Flüssigkeit nicht wieder in die Flasche zurückgezogen wird.

Dieser Schritt ist entscheidend, um die verbleibende Lösung steril und unbedenklich zu halten. Selbst eine winzige Menge an Flüssigkeit, die einer unsterilen äußeren Umgebung ausgesetzt ist, kann verunreinigt werden.

Wenn nach der Anwendung noch Restlösung auf der Flasche vorhanden ist, diese einfach mit einer schnellen Bewegung abschütteln und die Kappe ordnungsgemäß aufsetzen und verschließen.

### ZUSAMMENSETZUNG

I-DROP® PUR sind sterile, konservierungsmittelfreie, durch Blinzeln aktivierte, viskoadaptive Augentropfen zur Befeuchtung und enthalten: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid, Glycerin, Natriumhyaluronat, Natriumphosphat.

### WARNHINWEISE

Wenn Sie Augenschmerzen, Sehstörungen, anhaltende Rötungen oder Reizungen am Auge verspüren, oder wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder länger als 72 Stunden andauern, die Anwendung beenden und einen Arzt aufsuchen.

I-DROP® PUR kann die Wirkung anderer Lösungen oder Medikamente, die Sie möglicherweise am Auge anwenden, verändern. Dieses Präparat wurde nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit geprüft. I-DROP® PUR nicht bei infizierten Augen anwenden.

Unmittelbar nach der Anwendung keine Maschinen bedienen oder ein Fahrzeug führen. Um Verunreinigungen zu vermeiden, die Spitze des Behälters nicht mit Oberflächen in Kontakt bringen. Wenden Sie dieses Präparat nicht an, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Die Verschlusskappe nach Gebrauch wieder aufsetzen. Die Flasche fest verschlossen halten. Nicht anwenden, wenn die Flasche defekt oder beschädigt erscheint.

### AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN LAGERN.

### LIEFERFORM

I-DROP® PUR wird in einer Flasche mit einem Füllvolumen von 10 ml geliefert. Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



STERILE A



ZWISCHEN 2 ° C UND 25 ° C LAGERN UND  
NICHT ÜBER DAS VERFALLSDATUM HINAUS VERWENDEN (📅).

Entwickelt von Biocia Inc.

I-DROP® ist eine eingetragene Marke von I-MED Pharma Inc. © 2021 I-MED Pharma Inc.

Hergestellt in Frankreich für:

**I-MED PHARMA INC.**  
1601 St-Regis Blvd.  
Dollard-des-Ormeaux, QC  
Canada H9B 3H7  
T (514) 685-8118  
info@imedpharma.com

**imedpharma.com**

EC REP

**ARAZY GROUP GmbH** The Squire 12  
Am Flughafen, 60549 Frankfurt  
am Main Germany

CH REP

**MedEnvoy Switzerland**  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland

**MedEnvoy Switzerland**  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands