

BEZ KONSERWANTÓW
NATYCHMIASSTOWE I DŁUGOTRWAŁE NAWILŻENIE
NADAJE SIĘ DO SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
0.18% Wiskoadaptacyjny hialuronian

ZAAWANSOWANA ULGA



WSKAZANIA

Przynosi długotrwałą ulgę w przypadku drobnych podrażnień oka wywołanych ekspozycją na wiatr, słońce, wodę lub inne czynniki drażniące. Do stosowania jako środek nawilżający i zabezpieczający przed dalszym podrażnieniem lub łagodzący suchość oka. Może być stosowany z soczewkami kontaktowymi. I-DROP® PUR należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty otwarcia. Nie używać po upływie daty ważności (⌚).

WSKAZÓWKI

Umyj ręce przed użyciem. Nie używać po upływie daty ważności. Zakropł 1 kroplę do podrażnionego oka (oczu) w razie potrzeby. Patrząc w lustro, delikatnie odciągnij dolną powiekę i zakropł 1 kroplę na jej wewnętrzną powierzchnię lub nałóż 1 kroplę bezpośrednio na powierzchnię rogówki oka odchylając głowę do pozycji poziomej. Po zakropieniu strząśnij pozostałą kroplę z końcówki butelki i dokładnie zakręć nakrętkę. Przechowuj w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

1. Odwróć butelkę i delikatnie ją ściśnij, aż na czubku utworzy się kropla. Może to zająć kilka sekund, ponieważ roztwór musi przejść przez system zaworów jednokierunkowych.
2. Przenieś ostrożnie butelkę z kroplą zawieszoną na czubku nad oko i naciśnij delikatnie, aż kropla spadnie do podrażnionego oka.
3. Uwaga: Po użyciu na niebieskiej końcówce mogą zostać resztki płynu. Potwierdza to użycie butelki zgodnie z jej przeznaczeniem i płyn nie cofa się do butelki.

Jeśli po użyciu na butelce pozostaną resztki roztworu, po prostu strzepnij je energicznym ruchem i szczelnie zamknij nakrętkę.

Ten krok ma kluczowe znaczenie dla utrzymania sterylności i bezpieczeństwa pozostałego roztworu. Nawet niewielka ilość płynu wystawiona na działanie niesterylnego środowiska zewnętrznego może ulec skażeniu.

SKŁAD

I-DROP® PUR to sterylne, nie zawierające konserwantów, nawilżające wiskoadaptacyjne krople do oczu aktywowane za pomocą mrugania, zawierające: wodę do wstrzykiwań, chlorek sodu, glicerynę, hialuronian sodu, fosforan sodu.

OSTRZEŻENIA

W przypadku bólu oka, zmiany widzenia, ciągłego zaczerwienienia lub podrażnienia oka, lub jeśli jego stan się pogarsza się lub utrzymuje się przez ponad 72 godziny, przerwij stosowanie kropli i skonsultuj się z lekarzem.

I-DROP® PUR może zmieniać działanie innych roztworów lub leków, które stosujesz na to samo oko. Ten produkt nie był testowany podczas ciąży lub laktacji. Nie nakładaj I-DROP® PUR na zainfekowane oko.

Bezpośrednio po nałożeniu nie należy obsługiwać maszyn ani prowadzić pojazdów. Aby uniknąć zanieczyszczenia, końcówka pojemnika nie może dotknąć żadnej powierzchni. Nie używaj tego produktu, jeśli jesteś uczulony na którykolwiek ze składników. Po użyciu nałóż nakrętkę. Butelka musi być szczelnie zakręcona. Nie używać, jeśli butelka wydaje się uszkodzona lub naruszona.

TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

W JAKIEJ POSTACI JEST DOSTARCZANY LEK

I-DROP® PUR jest dostarczany w butelce o pojemności 10 ml. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



STERYLNE | A



2797

PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE MIĘDZY 2°C A 25°C.

Nie używać po upływie daty ważności (⌚).

Opracowany przez Biocia Inc.

I-DROP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy I-MED Pharma Inc.
©2021 I-MED Pharma Inc.

Wyprodukowano we Francji dla:

I-MED PHARMA INC.
1601 St-Regis Blvd.
Dollard-des-Ormeaux, QC
Canada H9B 3H7
T (514) 685-8118
info@imedpharma.com

imedpharma.com

EC | REP

ARAZY GROUP GmbH The Squire 12
Am Flughafen, 60549 Frankfurt
am Main Germany

CH | REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands