

BOUCHON MÉATIQUE

AJUSTEMENT FLEXIBLE AMÉLIORÉ POUR LA SÉCHERESSE OCULAIRE CHRONIQUE

Avec leur système de taille simple, les bouchons méatiques PLUG® FIT s'insèrent facilement, sont confortables pour le patient et demeurent en place pour un traitement éprouvé de la sécheresse oculaire chronique. Chaque bouchon méatique I-PLUG® FIT est moulé en silicone de qualité médicale.



- ✓ Deux tailles conviennent à la plupart des patients grâce au **système de taille simple**
- ✓ La conception flexible permet une **insertion facile** et une **rétenion supérieure**
- ✓ Le capuchon discret procure un **confort accru au patient**
- ✓ Choix entre bouchon stérile préinstallé ou non stérile, en lot
- ✓ Offert dans les formats très petit, petit, moyen et grand

UN SOULAGEMENT EFFICACE DURABLE POUR LES YEUX SECS GRÂCE À I-PLUG® FIT

- ✓ Les patients conservent plus de leurs larmes naturelles
- ✓ Non invasif, non chirurgical
- ✓ Procédure rapide et relativement sans douleur
- ✓ Éprouvé cliniquement
- ✓ Permanent tout en étant réversible



Si un bouchon I-PLUG® FIT est perdu dans les **30 jours suivant son insertion**, I-MED Pharma le remplacera **gratuitement**.

I-PLUG® FIT STÉRILE PRÉINSTALLÉ SUR APPLICATEUR 1 PAIRE PAR BOÎTE

TAILLE	MÉAT LACRYMAL	N° DE PRODUIT I-PLUG® FIT
Très petit	0,2 mm à 0,3 mm	820
Petit	0,3 mm à 0,5 mm	821
Moyen	0,6 mm à 0,8 mm	822
Grand	0,9 mm à 1,0 mm	823

*Emballé individuellement et préinstallé sur un applicateur stérile jetable.

I-PLUG® FIT NON STÉRILE EN LOT 10 PAIRES PAR BOÎTE

TAILLE	MÉAT LACRYMAL	N° DE PRODUIT I-PLUG® FIT
Très petit	0,2 mm à 0,3 mm	830
Petit	0,3 mm à 0,5 mm	831
Moyen	0,6 mm à 0,8 mm	832
Grand	0,9 mm à 1,0 mm	833

*Non stérile, 1 paire par sac de plastique. Applicateurs stériles compris.

BOUCHON MÉATIQUE

STÉRILE - PRÉINSTALLÉ

STÉRILISATION :

Les bouchons méatiques I-PLUG® FIT stériles préinstallés sont vendus sur des plateaux individuels, en boîtes de deux. La date d'expiration doit être confirmée avant l'utilisation. Si la date d'expiration est atteinte, le bouchon doit être jeté.

AVANT L'INSERTION :

Les patients présentant un larmoiement intermittent doivent subir un sondage et une irrigation à l'aide d'une solution d'irrigation stérile pour exclure la possibilité d'une obstruction canaliculaire existante.

INSERTION :

1. Anesthésier la région du méat en administrant un anesthésique topique dans le sac conjonctival.
2. Appliquer une goutte de solution saline ou de larmes artificielles sur le bouchon méatique I-PLUG® FIT pour faciliter l'insertion.
3. Positionner l'applicateur en plaçant l'index sur le bouton de détente de l'applicateur et en plaçant l'extrémité de l'applicateur portant le bouchon sur le méat (supérieur ou inférieur) du patient.


4. Insérer verticalement le bouchon I-PLUG® FIT en le plaçant dans le méat jusqu'à ce que le capuchon soit affleurant à l'ouverture du méat **[A]**.
5. Lorsque le bouchon est inséré convenablement, appuyer sur le bouton de détente et retirer l'applicateur **[B]**.
6. Confirmer que le bouchon est placé correctement en vérifiant que le capuchon est affleurant à l'ouverture du méat **[C]**. Après l'insertion, surveiller le positionnement et l'intégrité du bouchon méatique pour déterminer si ou quand il y a lieu de remplacer le bouchon.

RETRAIT :

Si le retrait s'avère indiqué, saisir la tige verticale du bouchon sous le capuchon exposé à l'aide de pinces stériles. Tirer délicatement vers le haut jusqu'à ce que le bouchon soit retiré **[D]**.

AVERTISSEMENTS :

Le bouchon méatique I-PLUG® FIT est conçu pour un usage unique. Ne pas le réutiliser. Si l'emballage stérile est endommagé ou ouvert, la stérilité n'est plus garantie et le bouchon I-PLUG® FIT doit être jeté.

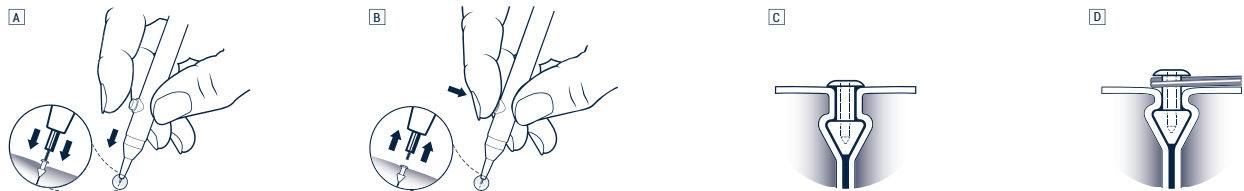

BOUCHON MÉATIQUE

NON STÉRILE, EN LOT

STÉRILISATION :

Retirer les bouchons à stériliser du sac à l'aide de pinces. Saisir le bouchon par la tige, le placer dans une pochette autoclave et sceller. Le bouchon I-PLUG® FIT peut être stérilisé à l'aide d'un système de pression vapeur. La température du cycle est de 121 °C (259 °F) et la durée du cycle est de 30 minutes. Le séchage nécessite 30 minutes supplémentaires. Le cycle complet répond aux exigences d'un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10⁻⁶.

ASSEMBLAGE :

Installer le bouchon méatique stérilisé sur l'applicateur stérile à l'aide de pinces. Saisir le bouchon par la tige et guider soigneusement le fil de l'applicateur dans l'ouverture du capuchon du bouchon. Stabiliser le bouchon sur le fil de l'applicateur en plaçant les pinces sur le dessus du bouchon et en appuyant doucement. Le bouchon est installé correctement quand le fil atteint le bout de la tige, là où elle commence à rétrécir.

AVANT L'INSERTION :

Les patients présentant un larmoiement intermittent doivent subir un sondage et une irrigation à l'aide d'une solution d'irrigation stérile pour exclure la possibilité d'une obstruction canaliculaire existante.

INSERTION :

1. Anesthésier la région du méat en administrant un anesthésique topique dans le sac conjonctival.
2. Appliquer une goutte de solution saline ou de larmes artificielles sur le bouchon méatique I-PLUG® FIT pour faciliter l'insertion.
3. Positionner l'applicateur en plaçant l'index sur le bouton de détente de l'applicateur et en plaçant l'extrémité de l'applicateur portant le bouchon sur le méat (supérieur ou inférieur) du patient.
4. Insérer verticalement le bouchon I-PLUG® FIT en le plaçant dans le méat jusqu'à ce que le capuchon soit affleurant à l'ouverture du méat **[A]**.
5. Lorsque le bouchon est inséré convenablement, appuyer sur le bouton de détente et retirer l'applicateur **[B]**.
6. Confirmer que le bouchon est placé correctement en vérifiant que le capuchon est affleurant à l'ouverture du méat **[C]**. Après l'insertion, surveiller le positionnement et l'intégrité du bouchon méatique pour déterminer si ou quand il y a lieu de remplacer le bouchon.

RETRAIT :

Si le retrait s'avère indiqué, saisir la tige verticale du bouchon sous le capuchon exposé à l'aide de pinces stériles. Tirer délicatement vers le haut jusqu'à ce que le bouchon soit retiré **[D]**.

AVERTISSEMENTS :

Le bouchon méatique I-PLUG® FIT est conçu pour un usage unique. Ne pas le réutiliser.

La gamme de produits pour les maladies de la surface oculaire d'I-MED Pharma comprend :



Outils de diagnostic



Larmes artificielles viscoadaptives



Hygiène oculaire



Nutrition

VOYEZ LA DIFFÉRENCE

🛒 Clients Canadiens, visitez osdcare.com
Clients Internationaux, visitez imedpharma.com
514-685-8118 | 1-800-463-1008