

I-RELIEF™

MASQUE CHAUD/FROID THÉRAPEUTIQUE POUR LES YEUX AVEC THERMABEADS™

AGIT PENDANT QUE VOUS VOUS REPOSEZ

Masque chaud/froid thérapeutique pour les yeux avec ThermaBeads™ pour le soulagement des symptômes liés à la blépharite, à la sécheresse oculaire, au dysfonctionnement des glandes de Meibomius (DGM), aux orgelets et aux chalazions, ainsi qu'aux maux de tête, à la pression des sinus, à la tension, à l'enflure et au gonflement.

Sans latex | non allergénique



SYMPTÔMES	UTILISÉ CHAUD
<ul style="list-style-type: none"> Paupières rouges et enflées Sensation granuleuse, démangeaisons, brûlure ou picotement autour des yeux Cils croûteux Peau qui pèle autour des yeux Yeux douloureux et larmolement Sensibilité à la lumière Sensation de corps étranger Vue brouillée 	<ul style="list-style-type: none"> Aide à se liquéfier l'huile de façon à ce qu'il s'écoule mieux des glandes Empêche les larmes de s'évaporer trop rapidement Améliore la circulation sanguine Aide à détendre les yeux Procure plus de confort



SYMPTÔMES	UTILISÉ FROID
<ul style="list-style-type: none"> Maux de tête Pression dans les sinus Tension Enflure ou gonflement Yeux rouges, fatigués et douloureux 	<ul style="list-style-type: none"> Aide à réduire la sensation des yeux irrités qui « chauffent » Stimule la constriction des vaisseaux sanguins pour réduire l'inflammation Aide à soulager la fatigue oculaire Procure plus de confort

MODE D'EMPLOI :

Utiliser la housse protectrice pour protéger le masque des huiles, du maquillage et de la saleté. Retirer et laver la housse au besoin.

THÉRAPIE PAR LA CHALEUR : Pour le soulagement des symptômes liés à la blépharite, à la sécheresse oculaire, au dysfonctionnement des glandes de Meibomius (DGM), aux orgelets et aux chalazions.

INSTRUCTIONS :

1. Le masque I-RELIEF™ doit être à la température ambiante avant d'être réchauffé.
2. Insérer le masque I-RELIEF™ dans la housse protectrice (facultatif) et le placer à plat dans une assiette propre allant au micro-onde.
3. Régler la puissance à « élevé » et réchauffer pendant 20 secondes. **Avant l'application**, toujours toucher le masque I-RELIEF™ avec les doigts d'abord pour en vérifier la température. Si le masque est trop chaud, le laisser refroidir 1-2 minutes, puis revérifier la température. Pour augmenter la chaleur, repasser au micro-onde en intervalles de 5 secondes jusqu'à l'atteinte de la température désirée. **Ne pas dépasser un maximum de 30 secondes de chauffage.**
4. Placer le masque I-RELIEF™ sur les yeux fermés, puis l'attacher avec la bande ajustable, si désiré.
5. Porter de 3 à 5 minutes, ou pendant la durée précisée par un médecin. **Ne pas appliquer pendant plus de 20 minutes à la fois.**

THÉRAPIE PAR LE FROID : Contribue au soulagement des maux de tête, de la pression des sinus, de la tension, de l'enflure et du gonflement.

INSTRUCTIONS :

1. Insérer le masque I-RELIEF™ dans la housse protectrice (facultatif) et le placer au congélateur dans un sac de plastique refermable pendant 30 minutes.
2. Sortir le masque I-RELIEF™ du congélateur et du sac de plastique, puis le placer sur les yeux fermés en l'attachant avec la bande ajustable, si désiré. Porter de 5 à 7 minutes, ou pendant la durée précisée par un médecin.

Entretien du masque I-RELIEF™ :

Retirer de la housse. Laver à la main seulement, à l'eau froide avec un détergent doux. Rincer abondamment. Compresser doucement pour retirer l'excès d'eau (ne pas tordre). Poser à plat sur une surface propre et ventilée pendant au moins 24 heures ou jusqu'au séchage complet. Laver immédiatement en cas d'exposition aux aliments, huiles, graisses ou autres saletés.

Entretien de la housse :

Laver à la machine, à l'eau tiède et à cycle régulier avec des couleurs similaires, à l'aide d'un détergent ordinaire. Sécher à la machine à basse température. Laver la housse aussi souvent que nécessaire.

Rangement :

Ranger le masque I-RELIEF™ au frais et au sec. Tenir loin des flammes.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :

- **Pour usage externe seulement**
- **Tenir loin de la portée des enfants**
- Ne pas appliquer pendant plus de 20 minutes à la fois
- Jeter le masque I-RELIEF™ s'il est percé ou brisé
- Toujours vérifier la température du masque I-RELIEF™ avant de le poser sur les yeux
- Le surchauffage ou l'application prolongée peuvent causer des blessures
- Ne pas utiliser sur les nourrissons
- Ne pas appliquer sur la peau sensible, la peau insensible, ni les blessures ouvertes
- Ne pas faire bouillir
- Surchauffer le masque I-RELIEF™ au micro-onde peut l'endommager
- Ne pas ingérer le contenu
- Réchauffer en suivant les instructions. Ne pas appliquer si trop chaud
- Ne pas s'endormir en portant le masque I-RELIEF™
- Les personnes atteintes de diabète, de troubles de la circulation, d'infections cutanées, etc. devraient consulter leur médecin avant l'utilisation
- Consulter votre médecin si votre état s'aggrave ou si une irritation se manifeste

La gamme de produits pour les maladies de la surface oculaire d'I-MED Pharma comprend :



Outils de diagnostic



Gouttes oculaires viscoadaptives



Hygiène oculaire



Nutrition

VOYEZ LA DIFFÉRENCE

🛒 Clients Canadiens, visitez osdcare.com
Clients Internationaux, visitez imedpharma.com
514-685-8118 | 1-800-463-1008